



ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ Α. ΙΩΑΝΝΗΣ  
Sanaflex Anatomic  
Κυρρου 93, Athens, 164 51



A-5071  
Περικάρπιο, Wrist Support

## ΜΕΓΕΘΟΛΟΓΙΟ

**One Size**  
(S - XL)

GR | Ελληνικά

A-5071, Περικάρπιο

## ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

### ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Έπειτα από κάταγμα και διάστρεμα, για βαριές χειρονακτικές εργασίες, χρήση εργαλείων με δόνηση και αθλητικές δραστηριότητες. Σταθεροποίηση του καρπού μέσω ρυθμιζόμενης σύσφιξης

### ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

Εφαρμόστε γύρω από τον καρπό, σφίξτε και ασφαλίστε τον ιμάντα έτσι ώστε να διασφαλίσετε σταθερό αλλά και άνετο κράτημα.

### ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν αν είστε αλλεργικός/η σε κάποιο από τα συστατικά του. Σε περίπτωση εμφάνισης ερεθισμού, διακόψτε τη χρήση του προϊόντος και συμβουλευτείτε το γιατρό σας.

### ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Πλύσιμο στο χέρι σε νερό στους 30°C με ήπιο σαπούνι ή απορρυπαντικό. Ξεπλύνετε καλά, μην στίβετε, αφήστε να στεγνώσει, μη σιδερώνετε.

### Σύνθεση

80% Neoprene, 20% Nylon  
Spacer Fabric: 45% Polyester, 55% Spandex



EN | English

A-5071, Wrist Support

## INSTRUCTION MANUAL

### INDICATIONS

For sequelae of fracture and sprains, heavy work, using vibrating instruments, sport activities. Stabilization of the wrist by adjustable closure.

### FIT

Fit the bandage around your wrist and secure with the hook and loopfastener.

### CAUTIONS

Do not use the product if you are allergic to one of its components. In case of any irritation occurrence, discontinue the use of the product and seek medical advice.

### CARE AND MAINTENANCE

Hand wash in warm soapy water (maximum 30°C). Dry flat, away from sources of excessive heat (radiator, tumble dryer).

### Material Composition

80% Neoprene, 20% Nylon  
Spacer Fabric: 45% Polyester, 55% Spandex

