



ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ Α. ΙΩΑΝΝΗΣ
Sanaflex Anatomic
Κυρου 93, Athens, 164 51



A-143D
Επιγονατίδα με ελάσματα / Hinged Knee Support

ΜΕΓΕΘΟΛΟΓΙΟ

One Size
(S - XL)

GR | Ελληνικά

A-143D, Επιγονατίδα με ελάσματα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Διάστρεμμα, τραυματισμός σε στάδιο αποκατάστασης και αποθεραπείας, κατάλοιπα από προηγούμενο τραυματισμό, χρόνια χαλάρωση, αστάθεια επιγονατίδας, οίδημα.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

Τοποθετήστε το γόνατο ώστε να κοιτάζει στην περιοχή της οπίης. Περάστε, διαδοχικά, τις δύο δέστρες πίσω από το πόδι και ασφαλίστε με το velcro. Προσαρμόστε την ασκούμενη πίεση στις ανάγκες σας.

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν αν είστε αλλεργικός/η σε κάποιο από τα συστατικά του. Σε περίπτωση εμφάνισης ερεθισμού, διακόψτε τη χρήση του προϊόντος και συμβουλευτείτε το γιατρό σας.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Πλύσιμο στο χέρι σε νερό στους 30°C με ήπιο σαπούνι ή απορρυπαντικό. Ξεπλύνετε καλά, μην στίβετε, αφήστε να στεγνώσει, μη σιδερώνετε.

Σύνθεση

80% Neoprene, 20% Nylon
Spacer Fabric: 45% Polyester, 55% Spandex



EN | English

A-143D, Hinged Knee Support

INSTRUCTION MANUAL

INDICATIONS

Easy fit knee support with straps, for people experiencing pain following knee injury, for wear during physiotherapy and day-to-day and/or sports activities
Knee sprain, injury during rehabilitation and physiotherapy, after-effects of injury, chronic laxity, painful, unstable knee, swelling

FIT

Position the knee so that it is facing the area with the hole. Pass the two bindings behind the leg in sequence and secure them. Adjust the pressure to your needs.

CAUTIONS

Do not use the product if you are allergic to one of its components.
In case of any irritation occurrence, discontinue the use of the product and seek medical advice.

CARE AND MAINTENANCE

Hand wash in warm soapy water (maximum 30°C). Dry flat, away from sources of excessive heat (radiator, tumble dryer).

Material Composition

80% Neoprene, 20% Nylon
Spacer Fabric: 45% Polyester, 55% Spandex

