



ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ Α. ΙΩΑΝΝΗΣ  
Sanaflex Anatomic  
Κυπρου 93, Athens, 164 51



A-145x  
Επιστραγαλίδα με οπή / Knee Cap Support

## ΜΕΓΕΘΟΛΟΓΙΟ

One Size  
(S - XL)

GR | Ελληνικά

A-145x, Επιστραγαλίδα με οπή

## ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

### ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Χονδροπάθεια επιγονατίδας, αρθρίτιδα, μετεγχειρητικός και μετατραυματικός ερεθισμός, στάθια επιγονατίδας και γόνατος, ανακουφίζει από τον πόνο και το πρήξιμο.

### ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

Τοποθετήστε το γόνατο στην περιοχή της οπής. Περάστε, διαδοχικά, τις δύο δέστρες πίσω από το πόδι και ασφαλίστε με το velcro. Προσαρμόστε την ασκούμενη πίεση στις ανάγκες σας.

### ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν αν είστε αλλεργικός/η σε κάποιο από τα συστατικά του. Σε περίπτωση εμφάνισης ερεθισμού, διακόψτε τη χρήση του προϊόντος και συμβουλευτείτε το γιατρό σας.

### ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Πλύσιμο στο χέρι σε νερό στους 30°C με ήπιο σαπούνι ή απορρυπαντικό. Ξεπλύνετε καλά, μην στίβετε, αφήστε να στεγνώσει, μη σιδερώνετε.

#### Σύνθεση

80% Neoprene, 20% Nylon  
Spacer Fabric: 45% Polyester, 55% Spandex



EN | English

A-145x, Knee Cap Support

## INSTRUCTION MANUAL

### INDICATIONS

Easy fit knee support with straps, for people experiencing pain following minor knee injury, for wear during day-to-day and/or sports activities Patellar chondropathy, retropatellar osteoarthritis, postoperative and post-traumatic irritation, instability of the patella and knee joint

### FIT

Position the knee so that it is facing the area with the hole. Pass the two bindings behind the leg in sequence and secure them. Adjust the pressure to your needs.

### CAUTIONS

Do not use the product if you are allergic to one of its components. In case of any irritation occurrence, discontinue the use of the product and seek medical advice.

### CARE AND MAINTENANCE

Hand wash in warm soapy water (maximum 30°C). Dry flat, away from sources of excessive heat (radiator, tumble dryer).

#### Material Composition

80% Neoprene, 20% Nylon  
Spacer Fabric: 45% Polyester, 55% Spandex

