

MED

vine

ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ Α. ΙΩΑΝΝΗΣ
SanaFlex Anatomic
Κυπρου 93, Athens, 164 51



MED

vine

A-191
Δέστρα Επικονδυλίτιδας / Elbow Support

ΜΕΓΕΘΟΛΟΓΙΟ

One Size
(S - XL)

GR | Ελληνικά

A-191, Δέστρα Επικονδυλίτιδας


ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Τενοντίτιδα, επικονδυλίτις του κερκιδικού οστού (tennis elbow) ή επικονδυλίτις του ωλένιου οστού (golf elbow)

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

Τοποθετήστε το ορθοπεδικό βοήθημα στο βραχίονα και σφίξτε την δέστρα όσο χρειάζεται φροντίζοντας να παραμένει άνετη η χρήση. Το μαξιλαράκι πρέπει να τοποθετηθεί στο σημείο των τενόντων που προκαλούν πόνο.

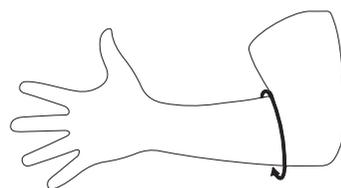

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν αν είστε αλλεργικός/η σε κάποιο από τα συστατικά του. Σε περίπτωση εμφάνισης ερεθισμού, διακόψτε τη χρήση του προϊόντος και συμβουλευτείτε το γιατρό σας.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Πλύσιμο στο χέρι σε νερό στους 30°C με ήπιο σαπούνι ή απορρυπαντικό. Ξεπλύνετε καλά, μην στίβετε, αφήστε να στεγνώσει, μη σιδερώνετε.

Σύνθεση

80% Neoprene, 20% Nylon
Spacer Fabric: 45% Polyester, 55% Spandex



EN | English

A-191, Elbow Support


INSTRUCTION MANUAL

INDICATIONS

Epicondylitis brace, helps reducing stress and relief pain. Inflammation of the common tendon at the elbow, e.g. tennis elbow (lateral epicondylitis) or golfer's elbow (medial epicondylitis)

FIT

Place your hand through the brace and slide the brace up your arm. Tighten the bandage as needed making sure it is in a comfortable position. The pillow should be placed above the tendons that cause pain.

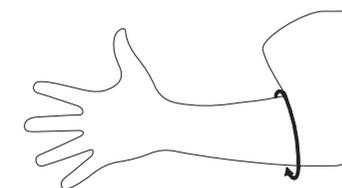

CAUTIONS

Do not use the product if you are allergic to one of its components. In case of any irritation occurrence, discontinue the use of the product and seek medical advice.

CARE AND MAINTENANCE

Hand wash in warm soapy water (maximum 30°C). Dry flat, away from sources of excessive heat (radiator, tumble dryer).

Material Composition

80% Neoprene, 20% Nylon
Spacer Fabric: 45% Polyester, 55% Spandex

