



ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ Α. ΙΩΑΝΝΗΣ
Sanaflex Anatomic
Κυπρου 93, Athens, 164 51



A-195
Επιαγκωνίδα / Elbow Support

ΜΕΓΕΘΟΛΟΓΙΟ

One Size
(S - XL)

GR | Ελληνικά

A-195, Επιαγκωνίδα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Ρευματικοί ερεθισμοί και ερεθισμοί αρθρώσεων. Αντιμετώπιση της επικονδυλίτιδας και της έσω επικονδυλίτιδας, της οστεοαρθρίτιδας και χρήση κατά τη διάρκεια κάποιας αθλητικής ή έντονης δραστηριότητας.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

Τοποθετήστε τον αγκώνα σας πάνω στη περιοχή του πλέγματος, περάστε τους ιμάντες γύρω από το χέρι και ασφαλίστε με το βέλκτρο ώστε ο επίδεσμος να προσφέρει σταθερή και άνετη στήριξη

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν αν είστε αλλεργικός/η σε κάποιο από τα συστατικά του. Σε περίπτωση εμφάνισης ερεθισμού, διακόψτε τη χρήση του προϊόντος και συμβουλευτείτε το γιατρό σας.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Πλύσιμο στο χέρι σε νερό στους 30°C με ήπιο σαπούνι ή απορρυπαντικό. Ξεπλύνετε καλά, μην στίβετε, αφήστε να στεγνώσει, μη σιδερώνετε.

Σύνθεση

80% Neoprene, 20% Nylon
Spacer Fabric: 45% Polyester, 55% Spandex



EN | English

A-195, Elbow Support

INSTRUCTION MANUAL

INDICATIONS

Provides relief of the irritated elbow joint and improves blood flow to the soft tissue areas surrounding the joint. Swelling and joint effusion, rheumatic and osteoarthritic irritation. Treatment of Tennis Elbow, Golfer's Elbow, during sport activities.

FIT

Place your elbow onto the netted area and secure with the straps. Make sure your elbow rests in a comfortable position.

CAUTIONS

Do not use the product if you are allergic to one of its components. In case of any irritation occurrence, discontinue the use of the product and seek medical advice.

CARE AND MAINTENANCE

Hand wash in warm soapy water (maximum 30°C). Dry flat, away from sources of excessive heat (radiator, tumble dryer).

Material Composition

80% Neoprene, 20% Nylon
Spacer Fabric: 45% Polyester, 55% Spandex

