

MED
vine

ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ Α. ΙΩΑΝΝΗΣ
Sanaflex Anatomic
Κυπρου 93, Athens, 164 51



MED
vine

A-531
Ελαστική Επιγονατίδα / Knee Support

ΜΕΓΕΘΟΛΟΓΙΟ

S M L

31 - 37,5cm 38 - 44,5cm 45 - 51,5cm

GR | Ελληνικά

A-531, Επιγονατίδα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Ελαστική επιγονατίδα, για ανθρώπους που αντιμετωπίζουν ενοχλήσεις στο γόνατο, έπειτα από μικροτραυματισμό και για χρήση σε καθημερινές δραστηριότητες. Πόνος στους μύες και στους τένοντες, κατάλοιπα προηγούμενου τραυματισμού, πρόληψη υποτροπιασμού κατά την εργασία, την άσκηση, ή οποιαδήποτε καθημερινή δραστηριότητα.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

Τραβήξτε το ορθοτικό βοήθημα πάνω από το γόνατο και βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν πτυχές στο ύφασμα.

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν αν είστε αλλεργικός/η σε κάποιο από τα συστατικά του. Σε περίπτωση εμφάνισης ερεθισμού, διακόψτε τη χρήση του προϊόντος και συμβουλευτείτε το γιατρό σας.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Πλύσιμο στο χέρι σε νερό στους 30°C με ήπιο σαπούνι ή απορρυπαντικό. Ξεπλύνετε καλά, μην σίβετε, αφήστε να στεγνώσει, μη σιδερώνετε.

Σύνθεση

70% Polyamide, 30% Elastodiene



EN | English

A-531, Knee Support

INSTRUCTION MANUAL

INDICATIONS

Elastic knee support, for people experiencing pain following minor knee injury, for wear during day-to-day and/or sports activities. Pain in muscles and tendons, post traumatic sequelae, prevention of recurrence during work, sport or daily activities.

FIT

Pull the bandage over the knee and ensure there are no creases or wrinkles in the fabric.

CAUTIONS

Do not use the product if you are allergic to one of its components. In case of any irritation occurrence, discontinue the use of the product and seek medical advice.

CARE AND MAINTENANCE

Hand wash in warm soapy water (maximum 30°C). Dry flat, away from sources of excessive heat (radiator, tumble dryer).

Material Composition

70% Polyamide, 30% Elastodiene

