



ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ Α. ΙΩΑΝΝΗΣ
Sanaflex Anatomic
Κυπρου 93, Athens, 164 51



A-532
Ελαστική Επιστραγαλίδα / Ankle Support

ΜΕΓΕΘΟΛΟΓΙΟ

S

M

L

18 - 21cm 21.5 - 24.5cm 25 - 28cm

GR | Ελληνικά

A-532, Επιστραγαλίδα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Ελαστική επιστραγαλίδα, για ανθρώπους που αντιμετωπίζουν ενοχλήσεις στον αστράγαλο, έπειτα από τραυματισμό και για χρήση σε καθημερινές δραστηριότητες. Πόνος στους μύες και στους τένοντες, κατάλοιπα προηγούμενου τραυματισμού, πρόληψη υποτροπιασμού κατά την εργασία, την άσκηση, ή οποιαδήποτε καθημερινή δραστηριότητα.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

Τραβήξτε προς τα πάνω την επιστραγαλίδα μέχρι η φτέρνα να εφαρμόζει στην ενσωματωμένη εσοχή.

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν αν είστε αλλεργικός/η σε κάποιο από τα συστατικά του. Σε περίπτωση εμφάνισης ερεθισμού, διακόψτε τη χρήση του προϊόντος και συμβουλευτείτε το γιατρό σας.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Πλύσιμο στο χέρι σε νερό στους 30°C με ήπιο σαπούνι ή απορρυπαντικό. Ξεπλύνετε καλά, μην σίβετε, αφήστε να στεγνώσει, μη σιδερώνετε.

Σύνθεση

70% Polyamide, 30% Elastodiene



EN | English

A-532, Ankle Support

INSTRUCTION MANUAL

INDICATIONS

Elastic ankle support, for people experiencing pain following minor ankle injury, for wear during day-to-day and/or sports activities. Pain in muscles and tendons, post traumatic sequelae, prevention of recurrence during work, sport or daily activities.

FIT

Pull up the ankle support over the ankle until the heel fits over the integrated recess.

CAUTIONS

Do not use the product if you are allergic to one of its components. In case of any irritation occurrence, discontinue the use of the product and seek medical advice.

CARE AND MAINTENANCE

Hand wash in warm soapy water (maximum 30°C). Dry flat, away from sources of excessive heat (radiator, tumble dryer).

Material Composition

70% Polyamide, 30% Elastodiene

